


sonic[®] SOUND

Snelstart gids




Sonicsound onderdelen:

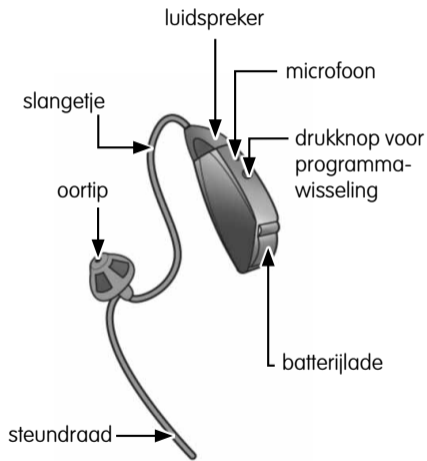


1. Open de batterijlade

Voor aan en uitzetten en vervangen batterij altijd de batterijlade volledig openen.

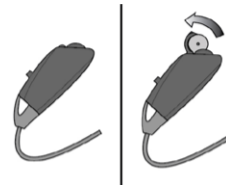

2. Plaatsing / vervanging batterij


Open de batterijlade. Haal de sticker van de nieuwe batterij en plaats deze in de batterijlade.

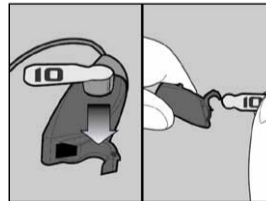

3. Plaats het juiste slangetje op het juiste toestel

De slangetjes hebben een rode en blauwe marking.


Rood: rechts
Blauw: links

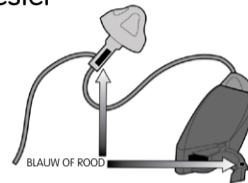

4. Plaatsing / verwijderen slang

Plaatsen: druk het slangetje rechtstandig op de luidspreker opening tot het stevig vastklikt.
Verwijderen: Houd de slang aan de bovenzijde vast en draai deze 90 graden, trek vervolgens het slangetje van het luidspreker uiteinde.

Plaatsen oortip: druk deze volledig over het einde van de slang.

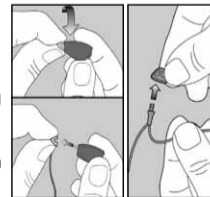

5. Plaatsing achter het oor

Leg de sonicsound achter het oor en plaats het slangetje rond de voorzijde van het oor.



6. Plaatsing oortip

Houd de sonicsound tegen het oor, beweeg het uiteinde voor de gehoorgang en plaats de tip in de gehoorgang.




7. Plaatsing steendraad

Leg de steendraad onder in de oorschelp voor extra steun.



8. Drukknop

Druk op de knop om te wisselen van programma. Het toestel zal met (piep) toontje aangeven in welk programma u zich bevindt.

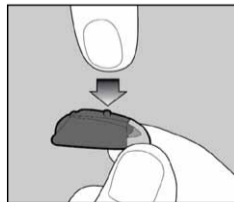

9. Programma's

Een druk op de knop geeft een programmawisseling.

Programma	toon
1 normaal	1 toon
2 luider	2 tonen
3 televisie/ Vergadering	3 tonen



4 batterijbesparend

Waarschuwing:

Niet voor inwendig gebruik

Buiten bereik van kinderen bewaren

